

Lafo® -acryl



- **Alkoholfreie**
- **Schnellwirkende**
- **Gebrauchsfertige**
- **NORO, MRSA**
- **H1N1 (Schweinegrippe)**
- **H5N1 (Vogelgrippe) wirksame**

Wischdesinfektion

- **VAH - gelistet**
- **Derma-Test „sehr gut“**

Anwendungsgebiete:

Schnelldesinfektion für empfindliche Oberflächen im Krankenhausbereich, Rettungswagen und andere medizinische Einrichtungen wie z.B.

- Ultraschallkopf
- Vaginalsonden
- Trage und Einrichtungen im Rettungswagen
Info für ÖRK - ÖGHMP-gelistet
- Therapieliegen
- wasserfeste Oberflächen
- Acrylflächen

Anwendungshinweise:

Lafo-acryl ist eine gebrauchsfertige Lösung. *Lafo-acryl* unverdünnt auf Gegenstände und Flächen aufbringen und einwirken lassen. Auf gleichmäßige und vollständige Benetzung achten.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Bakterizid, fungizid, viruzid (HIV, HBV, HCV, Noro, Rota Vaccina, BVDV, HPV, Papilloma-, Polyoma- SV 40, Papovavirus, H1N1, H5N1)

Einwirkzeiten:

Anwendungskonzentrationen unverdünnt	Einwirkzeit
Bakterien, Pilze EN1276, EN13697, EN1650 gem. VAH/DGHM**-Richtlinie bei verkürzten Einwirkzeiten	1 Min.
Vaccina, Grippe	1 Min.
behüllte Viren HIV, HBV, HCV, BVDV, H1N1, H5N1	1 Min.
Rotavirus	1 Min.
Bakterizid, Fungizid VAH hohe Belastung VAH/DGHM-gelistet	5 Min.
Flächendesinfektion in Krankenhaus und Praxis	5 Min.
HPV, Papilloma-, Papoa-, Polyomavirus SV 40	5 Min.
Noro-Virus (MNV)* EN14476	30 Min.

* Murines Noro-Virus

** Verbund für Angewandte Hygiene e.V./Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie

technische Angaben:

- *pH-Wert Konzentriert* 7
- *pH-Wert Anwendung* ca. 7
- *Flammpunkt* entfällt
- *Zusammensetzung*

100 g enthalten:
 0,25 g Dialkyldimethylammoniumchlorid
 0,25 g Benzalkoniumchlorid
 0,25 g Alkyldimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchlorid.

Weitere Inhaltstoffe:
 Duftstoffe, Limonene

- *Kennzeichnung nach GefStVo* entfällt
- *Gefahrkomponente* entfällt
- *gef2* Das Produkt ist kein Gefahrstoff nach Gefahrstoffverordnung. Die beim Umgang mit flüssigen Chemikalien geltenden Vorsichtsmaßnahmen sollten jedoch beachtet werden.
- *gef16* Das Produkt nicht versprühen. Nutzen Sie ggf. einen Schäumeraufsatz.
- *LF002* Behälter dicht geschlossen halten und vor Sonneneinstrahlung schützen. Chargennummer und Verwendbarkeitsdatum als gesonderten Aufdruck auf der Verpackung beachten.


ADR(Transport)

Gefahrstoff entfällt
Klasse entfällt
Ziffer entfällt
Zettel entfällt
Gefahrauslöser entfällt

Lieferformen:

1000 ml Flasche Versandeinheit 10 Flaschen

Artikelnummer 20512352-009

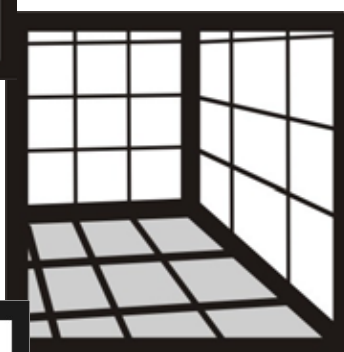

LAFOSAN Ltd
 Römerstr. 140
 D-85609 Aschheim
 Fon +49 (0)89/9001 9799
 Fax +49 (0)89/9001 9798
 www.lafosan.de
 info@lafosan.de