

WISCO® - Wipes

*Feuchttuch - Spendersysteme
für die
Flächendesinfektion*



Universell einsetzbares Vliestuchspendersystem für alle marktüblichen Desinfektionsmittel zur täglichen Flächendesinfektion

WISCO® - Wipes Spendersystem für Profis



Das Lafosan Wisco-Wipes Spendersystem ist ein universell einsetzbares System zur Flächendesinfektion, bestehend aus Spendereimer, Vliestuchrolle, Deckel mit farbiger Verschlusskappe, sowie beschriftbare Etiketten.

Anwendungsgebiete:

- **auf Arbeitsflächen**
- **auf Patientenliegen**
- **auf Nachttischen und anderen patientennahen Flächen**
- **zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen in kritischen Hygienebereichen**

Das einfache Prinzip und die schnelle Handhabung bietet dem Anwender viele Vorteile: Der wiederverwendbare Spendereimer wird mit einer trockenen Vliestuchrolle aus einzeln abreißbaren Tüchern und dem gewünschten Desinfektionsmittel befüllt. Das aufgenommene Desinfektionsmittel lagert sich nicht an das Vlies an, sondern wird nahezu 100% an die zu desinfizierende Oberfläche abgegeben. Bei richtiger Anwendung beträgt die Standzeit 28 Tage. Der Einmalgebrauch der Vliestücher bietet eine besonders hygienische Arbeitsweise als auch eine reduzierte Arbeitsvorbereitungszeit.

Eigenschaften:

- **zur Flächendesinfektion und Reinigung**
- **einfache und schnelle Handhabung**
- **stabiler wiederverwendbarer Spendereimer mit Tragegriff**
- **Deckelaufsatz mit Verschlusskappe erhältlich in 4 verschiedenen Farben zur besseren Unterscheidung von verwendetem Produkt oder Arbeitsbereichen**
- **Vliesrolle aus reißfestem, hochwertigem Material**
- **schützt Anwendungslösung vor Kontamination und Verdunstung**
- **sparsam im Verbrauch von Tüchern und Anwendungslösung**
- **verwendbar für alle handelsüblichen Desinfektionsmittel**

Anleitung:

Wichtiger Hinweis für den Anwender: Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch!

1



- Öffnen des Spendereimers
- zur Sicherheit und zum Schutz der Vliesrolle empfehlen wir das Tragen von Schutzkleidung und Handschuhen

2



- Nehmen Sie die Vliesrolle aus der Verpackung und stellen sie in den Eimer

3



- Je nach gewünschter Feuchtigkeit mit 1-2 Liter entsprechend der DGHM/VAH-Konzentration hergestellten Desinfektionsflüssigkeit oder Reinigungslösung befüllen
- Nach ca. 10 Minuten ist die Rolle gleichmäßig durchtränkt

4



- Nach dem Einfüllen der Flüssigkeit, ziehen Sie das erste Vliestuch aus der Mitte der Vliesrolle und ziehen Sie es durch die Öffnung des Spendersystems

5



- Verschließen Sie den Deckel des Spendereimers durch rundum pressen am Rand des Deckels, sowie dem Verschlussaufsatz

6



- Auf dem beiliegenden Etikett tragen Sie Produktname, Konzentration, Zubereitungs- und Haltbarkeitsdatum, Einwirkzeit und Chargennummer ein.

Wiederbefüllung:

- Bei richtiger Handhabung beträgt die Standzeit 28 Tage
- vor Wiederbefüllung Beschriftungsetikett, Vlies- und Flüssigkeitsreste sowie Beschriftungsetikett entfernen
- Spender und Einzelteile des WISCO -Wipes Spendersystems gründlich mit einem Desinfektionsmittel reinigen oder gegebenenfalls thermisch mittels Geschirrspülautomat aufbereiten (belastbar bis 70°C)
- Neue Vliesrolle und Anwenderlösung wie oben beschrieben einsetzen



1. Wisco Wipes Vliesrollen zum Desinfizieren

Artikelnummer	Vliestuch-Format	Blatt/Rolle	Rolle/Karton
H1936-660	19 x 36 cm	60	9
H1936-690	19 x 36 cm	90	8
H2824-670	28 x 24 cm	70	9
H2832-660	28 x 32 cm	60	8
H2832-690	28 x 32 cm	90	6

2. Wisco Wipes Vliesrolle zum Reinigen und Desinfizieren

Artikelnummer	Vliestuch-Format	Blatt/Rolle	Rolle/Karton
H2832-590 DTR	28 x 32 cm	90	6

3. Spendererimer und Deckel mit Verschlussaufsatz in 4 verschiedenen Farben

Artikelnummer	Produkt	Farbe	Volumen
H2824-E	Spendererimer klein	weiss	4 l
H2832-E	Spendererimer groß	weiss	5 l

Durch die verschiedenen farbigen Verschlussaufsätze, können Sie den Spendererimer für einen bestimmten Arbeitsbereich definieren und vermeiden somit Kreuzkontaminationen:

z.B. Fläche o. Alkohol
z.B. Lafo -acryl

z.B. Fläche mit Alkohol

z.B. Instrumente

z.B. Küche



4. Wandhalterung für Spendererimer, abschließbar

Artikelnummer	Produkt	Menge
SCH2832-EH	Wandhalterung	1



Für eine zuverlässige Flächendesinfektion empfehlen wir

Lafo -acryl

Artikelnummer	Produkt	Menge
20512352-009	Lafo-acryl, 1000 ml Flasche	10

LAFOSAN Ltd
Römerstr. 140
D-85609 Aschheim
Fon +49 (0)89/9001 9799
Fax +49 (0)89/9001 9798
www.lafosan.de
info@lafosan.de